



Novi pristup u liječenju rana

Altrazeal transformirajuća obloga u prašku materijal je napredne tehnologije koja je, po pitanju svojstava i učinkovitosti, jedinstvena među svim ostalim oblogama za rane. Stvorena je da bi rani pružila optimalne uvjete za poboljšano cijeljenje.



Altrazeal
Stvoren za rane koje
se teško liječe.

Dobra priprema rane je ključna za optimalno cijeljenje

BOJA RANE		KOMPATIBILNOST
Kontaminirane/Kolonizirane/Biofilm		✓
Inficirane		✓
Teško dostupna mjesta		✓
Kontrola rubova rane		✓

RAZINA EKSDATA		KOMPATIBILNOST
MALA		✓
OSREDNJA		✓
VISOKA		✗

BOJA RANE		KOMPATIBILNOST
Roza/epitelizirajuća		✗
Crvena/granulirajuća		✓
Žuta/zagnojena		✗
Crna/nekrotična		✗

Altrazeal transformirajući oblog u prašku

POTREBNA AKTIVNOST

Transformirati Altrazeal s antiseptikom, npr. octenidinom umjesto s fiziološkom otopinom

Pod liječničkim nadzorom, transformirati odgovarajućim antiseptikom. Ako ima indikacija, tretirati dodatno s odgovarajućim sistemskim antibiotikom.

Altrazeal omogućava tretiranje teško dostupnih mjesta, npr. skalpa.

Obzirom da Altrazeal ispunjava ranu i pokriva njene rubove, kontroliranje okoline rane je moguće u svakom trenutku. Ako je postavljen sekundarni oblog, on bi trebao biti transparentan.

POTREBNA AKTIVNOST

Sekundarni oblog u pravilu nije potreban.

Razmotriti sekundarni oblog

Kontrolirati razinu eksudata prije započinjanja tretmana s Altrazealom.

POTREBNA AKTIVNOST

Nije prvi izbor kod epitelizirajućih rana jer ne donosi dodatnu korist prema drugim oblogama. Altrazeal može biti izbor kod rana koje cijele na mjestima koje je teško poviti npr. prstima

Razmotriti količinu sekreta i bakterija

Odstraniti gnoj prije upotrebe Altrazeala. Priprema rane je obavezna prije apliciranja bilo kojeg obloga za ranu.

Potražiti medicinski savjet prije tretmana



Upute za uporabu za zdravstvene djelatnike

1. Očistite površinu rane. Provjerite da li je površina rane vlažna. Ako je potrebno primijenite dodatnu sterilnu fiziološku otopinu ili njen ekvivalent.
2. Provjerite da na površini rane nema proizvoda baziranih na ulju.
3. Otvorite blister i u tankom jednolikom sloju posipajte prašak preko cijele vlažne površine rane. Količina koju ćete upotrijebiti ovisi o dubini rane, veličini te količini eksudata.
4. Kako bi se stvorio jednoliki pokrov koji ispunjava i potpuno zatvara površinu rane prašak se može izravnati sa sterilnom rukavicom ili instrumentom.
5. Pričekajte da se prašak na površini rane stopi pomoću apsorpcije eksudata iz rane.
6. Ako se unutar prvih par minuta nakon primjene ALTRAZEAL praška nije stvorio jednoliko vlažni oblog rane, pokapajte rub rane sterilnom fiziološkom otopinom ili njenim ekvivalentom ili koristeći bočicu sa sprejem pošpricajte sterilnu fiziološku otopinu preko površine ALTRAZEAL praška kako biste ubrzali transformacijski proces. Pripazite da raspršivač bude na udaljenosti oko 15 cm od praška. Nježno navlažite površinu i pričekajte da se kapljice fiziološke otopine upiju u prašak što će uzrokovati njegovo stapanje. Prašak još uvijek može izgledati bijel i granuliran; međutim, netaknut oblog će se stvoriti postepeno nakon što se stvori kohezivna struktura.
7. Na mjestima gdje rana nije dovoljno pokrivena moguće je primijeniti još praška.
8. Sve rane treba redovito pregledavati. Uklonite oblog ako zaključite da je to klinički nužno (npr. infekcija, upala, pretjerano krvarenje, pretjerano vlaženje, iritacija).
9. ALTRAZEAL može ostati na mjestu do 14 dana, dokle god rana izlučuje eksudat. Međutim, ako je klinički nužno, oblog se treba promijeniti. ALTRAZEAL će ostati u bliskom kontaktu s površinom rane sve dok koža ispod njega ne zacijeli. Površine obloga koje pokrivaju zdravu kožu otkinut će se od ostatka obloga i oljuštiti kao čestice slične krasti.
10. ALTRAZEAL oblog ne zahtjeva sekundarni oblog osim ako zdravstveni djelatnik ne utvrdi da je nužan. Ako je potreban sekundarni oblog, koristite obloge koji propuštaju pare. Treba izbjegavati obloge bazirane na petroleju, okluzivne obloge ili adhezive koji su u kontaktu s površinom te super apsorbirajuće polimere.
11. Tijekom tuširanja treba pripaziti na oblog kako bi se spriječilo njegovo namakanje. Oblog nemojte potapati u vodu.
12. Oblog se može ukloniti zasićivanjem sterilnom fiziološkom otopinom tijekom 3-5 minuta nakon čega se nježno odigne.
13. Čuvajte izvan dohvata i pogleda djece mlađe od 12 godina.
14. Nemojte ga stavljati u autoklav